

1. Inleiding


Bedankt voor uw aankoop van de Unique-horn Sport Hoef Boot. Deze innovatieve hoefschoen is ontworpen voor comfort, bescherming en prestaties – geschikt voor dagelijks recreatief en sportief gebruik.



Scan for user manuals
in other languages

2. Veiligheidsinstructies

- Lees deze handleiding volledig vóór gebruik.
- Gebruik de hoefschoen niet op beschadigde of gevoelige hoeven zonder advies van een hoefprofessional.
- Laat uw paard wennen aan de hoefschoen.

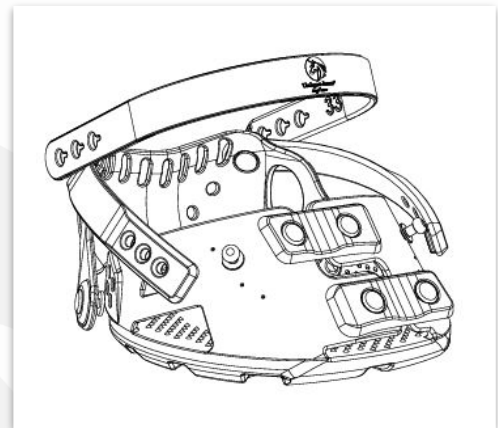

3. Leveringsinhoud

- ✓ 2 x Hoefschoenen
- ✓ 2 x Inbussleutel (voor afstelling van de zijsluiting en gaiterverbinding).
- ✓ 4 x Reserve schroeven
- ✓ 1 x Gebruikershandleiding
- ✓ 1 x Opbergdoos

Controleer direct na ontvangst of alle onderdelen aanwezig zijn. Neem bij ontbrekende onderdelen contact op met onze klantenservice.


4. Gebruik

4.1 Eerste gebruik

- Laat idealiter een hoefprofessional de juiste maat vaststellen en de schoenen op de juiste instellingen instellen.
- Oefen met het aan- en uittrekken zonder tijdsdruk.
- Laat uw paard wennen aan de schoen. De hoefschoenen horen ingelopen te worden. Begin met +- 15 minuten per dag.

4.2 Aantrekken

1. Zorg voor een schone, droge hoef.
2. Open beide zijsluitingen **(A)** en de kootriem aan één kant **(B)**.
3. De riemen op de voorkant **(C)** van de schoen zijn géén sluitingen en horen desbetreffend ook niet geopend te worden!
4. Vouw de gaiter/achterkant **(D)** naar beneden.
5. Schuif de hoef in de schoen en zorg dat de teen goed in de voorkant zit.
6. Vouw de gaiter weer omhoog zodat de hoefballen goed in de gaiter liggen.
7. Sluit de zijriemen strak maar comfortabel.
8. Sluit de kootriem. De kootriem hoort **niet** strak aan te sluiten. Er moeten twee vingers tussen riem en koot passen.

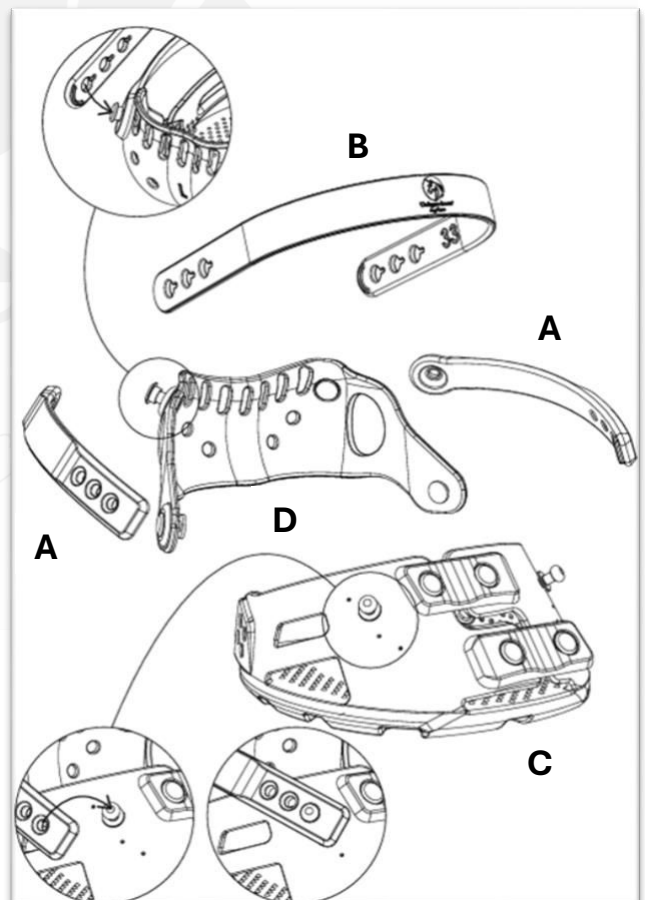


4.3 Uittrekken

- Open beide zijsluitingen en de kootriem aan één kant.
- Vouw de gaiter/achterkant naar beneden.
- Trek de schoen voorzichtig van achter naar voren los.

5. Instelmogelijkheden

Volgende aanpassingen zijn mogelijk:

- **Hoogteverstelling hiel/hoefbal:** Met de meegeleverde inbusleutels de schroeven opendraaien en op één van de vier mogelijke instellingen vast zetten.
- **Zijsluiting:** De sluitingsknop aan de zijkanten heeft vier verschillende instelmogelijkheden. Bij extra belasting kan naar behoefte een tweede meegeleverde knop aan iedere zijkant bevestigd worden waardoor de zijsluiting op twee plekken vastzit.
- **Kootriem:** Verstelbare lengte voor perfecte pasvorm.

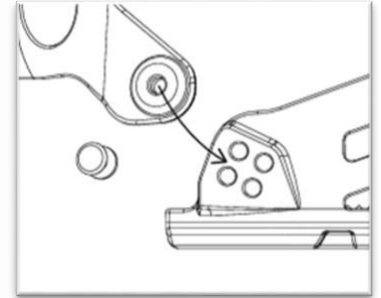

Raadpleeg uw hoefprofessional bij twijfel over de juiste instelling.

6. Onderhoud en Reiniging

6.1 Reiniging

- Spoel de schoenen na elk gebruik met water en/of gebruik een zachte borstel om vuil te verwijderen.
- Laat aan de lucht drogen, vermijd direct zonlicht of warmtebronnen.

6.2 Inspectie

- Controleer wekelijks op slijtage, losse onderdelen of beschadigingen.
- Vervang tijdig versleten sluitingen of andere onderdelen.

6.3 Opslag

- Bewaar droog en uit direct zonlicht.

7. Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Kan de schoen gebruikt worden als ziekteschoen voor hoefproblemen?

Antwoord: Deze hoef schoen is **absoluut niet** bedoeld voor langdurig gebruik voor bijvoorbeeld in de paddock/gebruik als ziekteschoen. Een dergelijke toepassing kan grote schade toebrengen aan de hoef en het hele paard!

8. Contact en Service

E-mail: info@unique-horn.com

Website: www.unique-horn.com



9. Garantievoorwaarden

Onze hoef schoen komt met een garantie van 12 maanden op fabricagefouten.

Slijtage door normaal of abnormaal gebruik valt hier niet onder!

Voor garantieclaims: bewaar het aankoopbewijs en neem contact op via e-mail of telefoon.